



schnell und parfümfrei

DESOMED[®] RAPID PUR

Alkoholische Schnelldesinfektion

MRSA-wirksam



- schnelle Wirksamkeit
- sehr gut geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich
- rückstands- und parfümfrei

Eigenschaften

DESOMED RAPID PUR als alkoholische Schnelldesinfektion ist vor allem in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich, aber auch in Krankenhäusern, Arztpraxen und Einrichtungen zur Pflege zur schnellen Desinfektion von Oberflächen oder Medizinprodukten geeignet. Es ist frei von Parfüm und trocknet rückstandsfrei ab.

Anwendungsgebiete

Gem. MPG: Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozid-Richtlinie: Zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und medizinischem Inventar.

Beispiele:

- Oberflächen im Küchenbereich und in der Lebensmittelindustrie
- Gerätschaften in der Küche, z. B. Aufschnittmaschinen
- Behandlungsliegen in Arzt- oder Zahnarztpraxen
- Verbands-/Pfliegewagen
- Kontaminierte Flächen
- Medizinprodukte wie z. B. Stethoskope oder Blutdruckmanschetten

Anwendung

Zu desinfizierende Flächen vollständig benetzen, Flächen müssen über die Dauer der Einwirkzeit feuchtgehalten werden. Nach Ablauf der Einwirkzeit können die Flächen trocken gerieben werden.

Wirkungsspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- fungizid (C. albicans)/levurozid
- begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren, inkl. HBV/HIV/HCV)
- wirksam gegen Noro-Viren (MNV)

Konzentrationen und Einwirkzeiten

bakterizid (inkl. MRSA), fungizid (C.albicans)/levurozid
gem. DGHM/VAH konz. 1 Min.*

* gelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH-Liste

TbB konz. 30 Sek.

nach DVG (Lebensmittelbereich): siehe DVG-Liste

begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV/HCV/BVDV/
Vaccinia-/Influenza-/Grippe-Viren)
gem. RKI-Empfehlung: konz. 30 Sek.

Noro-Viren (MNV) konz. 1 Min.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:
45 g Ethanol

Gebindegröße	VE	PZN	EAN Gebinde	Artikelnummer
1 L Descoflexflasche	10	2535024	4260055043421	DT-323-010CH
5 L Kanister	3	2290597	4260055042349	DT-323-050CH

CE 0482

DESOMED[®] RAPID PUR

Alkoholische Schnelldesinfektion

Besondere Hinweise

Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Gutachten

Prof. Dr. Rotter, Dip.Bact. (London), Wien:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH.

Prof. Dr. Schubert, Hygieniker, Frankfurt/M.:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH.

Dr. Brill, Hygieniker, Hamburg:

Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von DESOMED RAPID PUR im Deso Wipes System.

Desifizierende Wirkung des Vliesstoffsystems Deso Wipes DT in Kombination mit DESOMED RAPID PUR.

Bergé & Co. GmbH, Vermold:

Freigabe zur Verwendung von DESOMED RAPID PUR mit MM-Desinfektionsmatten.

Chemisch physikalische Daten

Aussehen:	klare, farblose Lösung
pH-Wert Konzentrat:	ca. 6,5
Flammpunkt:	24°C

Dosierhilfen

Sprühkopf für 1 Liter Flasche, Dosierpumpe für Kanister, Kanisterumfüllhahn, Kanisterschlüssel

Produktstatus/Listungen

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste für den Lebensmittelbereich der DVG (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft).

Gemeldet als Biozid-Produkt bei der **baua** (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und -medizin) gem. Biozidgesetz: **baua Reg.-Nr.: N-27857 und N-42200.**

Entspricht der **EU-Richtlinie 93/42/EWG** für Medizinprodukte.